

PT

Blephagel

Gel estéril para a higiene diária das pálpebras e das pestanas

Hipoalergénico, testado sob controlo oftalmológico. Sem conservantes, parabenos, álcool ou perfume.

Conteúdo e apresentação:

Gel de limpeza estéril para pálpebras e pestanas
Bisnaga multidose airless™ de 30 g

Composição:

Aqua, poloxamer 188, PEG-90, carbomer, sodium hydroxide

Indicações:

BLEPHAGEL é um gel estéril hipoalergénico para a higiene diária das pálpebras e das pestanas.

A higiene das pálpebras é recomendada pelos oftalmologistas nas seguintes situações:

- Blefarites (anteriores e posteriores) (inflamação das pálpebras)
- Olho seco associado à disfunção das glândulas de meibomius (glândulas localizadas no interior das pálpebras que não funcionam corretamente)
- Lesões no olho e nas pálpebras devidas a acne rosacea (uma doença da pele da face com vermelhidão)
- Lesões no olho e nas pálpebras devidas a dermatite seborreica (uma doença da pele da face com vermelhidão e descamação)

A higiene das pálpebras pode também ser recomendada em caso de cirurgia quando é necessária uma limpeza cuidadosa das pálpebras e da base das pestanas.

BLEPHAGEL pode ser recomendado para portadores de lentes de contacto.

Propriedades:

BLEPHAGEL é um gel estéril formulado para uma limpeza suave e manual das pálpebras irritadas ou com lesões, ou da pele sensível ou com tendência para reações alérgicas.

A fórmula original de BLEPHAGEL:

- Facilita a aderência do produto às pálpebras
- Contém poloxamer que emulsiona, solubiliza e elimina suavemente o muco e os resíduos das pálpebras e da base das pestanas
- Respeita a hidratação natural da pálpebra
- Refresca, suaviza e acalma as pálpebras
- Não deixa resíduos, não é oleoso nem pegajoso

Precauções de utilização:

- Utilize sobre as pálpebras e as pestanas. Não aplique no olho.
- Rejeite a bisnaga 8 semanas após a primeira abertura.
- Não conservar acima de 25 °C.
- Não corte a bisnaga (risco de contaminação bacteriana).

MANTENHA FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Frequência de utilização:

Aplique BLEPHAGEL duas vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das suas pálpebras.

Instruções de utilização:

Na primeira utilização, aperte cuidadosamente a parte da frente da bisnaga (sobre o símbolo da Théa) durante 3 segundos para empurrar o gel na direção do doseador.

Depois, vire a bisnaga para baixo e pressione o doseador 3 vezes.



- 1** Ao pressionar o doseador coloca uma pequena quantidade de BLEPHAGEL sobre uma compressa (não aperte a bisnaga). Remova com a compressa os resíduos de gel que ficaram na extremidade da bisnaga.



- 2** Com a ajuda de um espelho, feche um olho e aplique suavemente o gel sobre a pálpebra fechada e sobre a base das pestanas.



- 3** Com movimentos circulares, massageie várias vezes com suavidade as pálpebras e a base das pestanas, até remover todos os resíduos.

- 4** Remova o BLEPHAGEL excedente da pálpebra com uma compressa limpa.

- 5** Repita estes 4 passos para o outro olho.

Tecnologia Steri-Free

Os Laboratores Théa são especialistas em produtos oftalmológicos e foram os pioneiros no desenvolvimento de um sistema sem conservantes com a criação do primeiro frasco multidose sem conservantes: sistema ABAK.

Os departamentos de investigação e desenvolvimento dos Laboratores Théa continuam a inovar com a Tecnologia Steri-Free que assegura que o gel para as pálpebras se mantém estéril mesmo após a primeira abertura e sem recorrer a conservantes.

Tecnologia Steri-Free, a combinação de 3 processos inovadores e exclusivos:

1. Uma formulação isenta de qualquer componente agressivo para uma máxima tolerância. O gel foi formulado com componentes ativos selecionados de acordo com a sua eficácia.
2. Estéril antes da abertura graças à nova e inovadora atmosfera de fabrico estéril, que possibilita o fabrico de um gel estéril sem conservantes.
3. Estéril após a abertura graças a um novo e inovador acondicionamento: a bisnaga multidose airless™ mantém a esterilidade do gel durante a sua utilização sem recurso a conservantes.

Tecnologia Steri-Free

- Garante a esterilidade e a qualidade do gel após a abertura
- Protege o gel contra qualquer contaminação bacteriana após a abertura
- Produz um gel isento de quaisquer componentes agressivos para uma máxima tolerância
- Permite que o gel tenha apenas os componentes ativos para uma melhor eficácia e segurança
- Permite uma aplicação simples e muito fácil do gel graças ao doseador airless®
- Permite que seja dispensada uma dose precisa e uniforme de gel graças ao doseador airless®

Os Laboratores Théa, especialistas na higiene das pálpebras, disponibilizam uma gama completa de produtos sem conservantes para a higiene diárias das pálpebras. Para mais informações consulte o nosso site: www.laboratoires-thea.com

Alguns dos nossos produtos não se encontram disponíveis em todos os países, pelo que deverá consultar o seu farmacêutico.