

Blephademodex

Toalhetes de limpeza estéreis sem conservantes

Indicações de utilização:

BLEPHADEMODEX é recomendado:

- para a higiene diária das pálpebras em caso de infeção por *Demodex*,
- para o alívio dos sintomas de infeção ou inflamação da pálpebra causada por *Demodex*, O demodex é o parasita microscópico da pele mais comum. A infeção por *Demodex* contribui para a inflamação da pálpebra (blefarite). O *Demodex* não é removido pelos agentes de limpeza diários normalmente utilizados. A presença de películas cilíndricas, que permanecem na base das pestanas, é um importante indicador de infeção por *Demodex*.

BLEPHADEMODEX remove crostas, películas, impurezas e agentes infecciosos das pálpebras e pestanas. BLEPHADEMODEX melhora os sintomas associados à infeção por *Demodex*, tais como a comichão, a sensação de ardor, a secura e a inflamação dos bordos das pálpebras, através da remoção dos parasitas *Demodex*.

Há uma diminuição da vermelhidão dos bordos das pálpebras e da sensação de corpo estranho.

A pele sensível torna-se mais suave e revitalizada por ação do hialuronato de sódio que é um agente hidratante natural da pele.

BLEPHADEMODEX está formulado com Terpeno-4-ol e é bem tolerado pois é isento de detergentes e conservantes.

BLEPHADEMODEX tem uma fórmula sem perfume, no entanto, devido aos seus componentes pode sentir um cheiro fresco, que se dissipa ao fim de poucos minutos.

A cor do toalhete (loção) pode variar. Tal é normal e deve-se aos extratos naturais da planta.

Dose:

Sintomas ligeiros a moderados: utilizar uma vez ao dia, preferencialmente à noite, durante 4 semanas. Sintomas moderados a graves: utilizar duas vezes ao dia, de manhã e à noite, durante 4 semanas. O seu profissional de saúde poderá adaptar a posologia e a duração do tratamento de acordo com a gravidade dos sintomas.

Tal como com outros tratamentos semelhantes para a blefarite, o seu profissional de saúde poderá recomendar a utilização concomitante de lágrimas artificiais.

BLEPHADEMODEX pode ser utilizado a partir dos 18 anos de idade.


Instruções de utilização:

Se utiliza lentes de contacto: tem de retirar as lentes antes de utilizar BLEPHADEMODEX.

Abra a saqueta e desdobre o toalhete que se encontra no seu interior.

Coloque o toalhete na ponta do dedo indicador e enrole-o à volta do dedo.

Com o olho fechado, aplique delicadamente o toalhete nas pálpebras e na base das pestanas. Massageie cuidadosamente as pálpebras com pequenos movimentos circulares, removendo com suavidade quaisquer crostas, películas ou secreções.

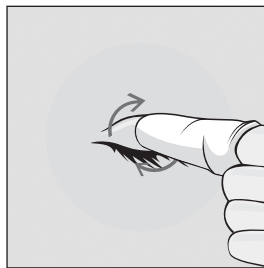

Repita no outro olho utilizando um toalhete novo. BLEPHADEMODEX não é oleoso e não é necessário enxaguar após a utilização.

Mantenha o seu olho fechado durante 15 segundos após a aplicação.

Precauções de utilização e advertências:

Apenas para aplicação na pele.

Evite tocar com o BLEPHADEMODEX no olho pois poderá sentir uma sensação de ardor.

Se tal acontecer, enxague com água estéril ou soro fisiológico.

BLEPHADEMODEX é um produto estéril, **para uma utilização única**. Não utilize novamente, pois tal pode originar um reduzido efeito de limpeza e aumentar risco de infeção.

Não utilize o toalhete se a saqueta estiver aberta ou danificada.

Não utilize após o prazo de validade indicado na embalagem exterior e na saqueta. O prazo de validade refere-se ao produto na sua embalagem intacta e conservado corretamente.

Os toalhetes utilizados devem ser eliminados no lixo doméstico.

Deixe de utilizar BLEPHADEMODEX e contacte o seu profissional de saúde se os seus sintomas se agravarem ou se ocorrer alguma reação alérgica.

Contraindicações:

Não utilize se tiver menos de 18 anos de idade pois não existem dados disponíveis.

Não utilize se estiver grávida ou a amamentar pois não existem dados disponíveis.

Não utilize se tiver alergia a qualquer um dos componentes.

Conservar entre 8 e 25°C.

MANTER FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Possíveis efeitos secundários:

Foram notificados os seguintes efeitos secundários: sensação de ardor após a utilização.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, oftalmologista, farmacêutico ou com o fabricante.

Descrição do produto:

Toalhete estéril, impregnado com uma loção.

A loção contém: PEG-8, Polysorbate 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 caprylic/capric glycerides Macrogol 6 glycerol caprylocaprata, Sodium hyaluronate, Dipotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Purified water.

Data de revisão das instruções de utilização:

Dezembro 2017



Fabricante

Laboratórios THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

França



+8°C

Conservar entre 8 e 25°C



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem (saqueta) estiver danificada

STERILE R

Esterilização por irradiação



Consultar as instruções de utilização



Advertência



Prazo de validade



Lote

CE 0459